



alfa



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Детская коляска ALFA для детей с особыми потребностями посвящается детям с ростом **100 – 150 см** и максимальный вес **55 кг**.

Его объемная и прочная конструкция, состоящая из рамы, сиденья и отдельной спинки, делает его чрезвычайно прочным и значительно облегчает как упаковку, так и транспортировку устройства.

Благодаря функции «Я расту вместе с тобой» Alfa позволяет плавно увеличивать глубину сиденья (**от 30 до 40 см**) и высоту спинки (**от 59 до 74 см**).

В сочетании с возможностью быстрого откидывания спинки, наклона, регулируемой подставкой для ног и регулируемыми подушками мы получаем комплексное изделие, обеспечивающее максимальный комфорт, безопасность и функциональность на долгие годы.

Alfa также может похвастаться современным дизайном, что делает его еще более универсальным и привлекательным.

ЭТО МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ЭТИКЕТКОЙ.

ПОКАЗАНИЯ

- параличи и травмы нижних конечностей различного происхождения
- параличи и травмы туловища
- ослабление постуральных мышц, отвечающих за поддержание правильного положения тела
- детский церебральный паралич
- миеломенингоцеле
- мышечные дистрофии

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В случае наличия противопоказаний к регулировке коляски в положении сидя и/или пассивной вертикализации следует проконсультироваться с физиотерапевтом или лечащим врачом.



УГОЛ НАКЛОНА СПИНКИ НАЗАД



УГОЛ НАКЛОНА СПИНКИ ВПЕРЁД



УГОЛ НАКЛОНА ПОДНОЖКИ



ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА

СБОРКА

Детская коляска ALFA для детей с особыми потребностями состоит из двух основных элементов: каркаса сиденья и каркаса спинки. Спинка крепится к сиденью с помощью простого фиксатора (подробности см. в инструкции).



Прежде чем сажать ребёнка в коляску, убедитесь, что фиксатор спинки надёжно заблокировался с обеих сторон. Для этого возьмитесь за спинку и слегка встряхните её. Правильно установленная спинка останется на месте.



МОДИФИЦИРУЮЩИЙ ПАРАМЕТРЫ

С помощью выбранных аксессуаров и нескольких простых движений мы можем адаптировать ALFA, подходящую для детей, рост и вес которых соответствуют параметрам, указанным в модели (рост 100 – 150 см, вес до 55 кг).


Коляска имеет регулируемые тазовые и боковые подушки (1), регулируемый по высоте подголовник (2), регулируемую по высоте и наклону спинку (3), наклонное сиденье с регулировкой глубиной (4) и регулируемую подставку для ног (5).

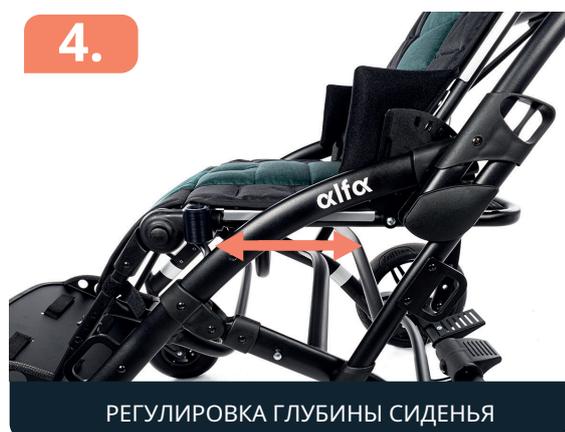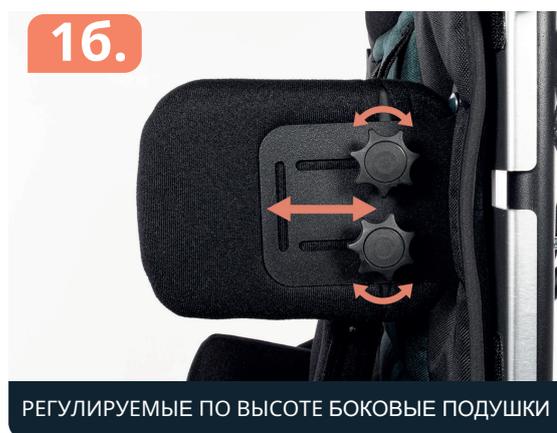

ОБОРУДОВАНИЕ



Боковая защита

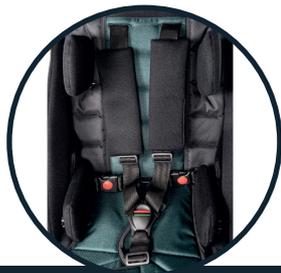


Боковые и грудные
поддержки



Поручень-ограничитель



Ремни для
разведения ног

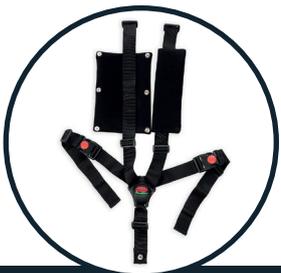

5-точечный
ремень



Регулируемый
абдуктор



Столик



Навес



Подголовник



Рюкзак



Корзина



Зонтик



Москитная сетка



Дождевик



Мешок для ног

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛЯСКИ

Ширина сиденья: 27 - 32 см*, 41 см**

Эффективная глубина сиденья: 30 - 40 см

Высота спинки: 59 - 74 см

Ширина спинки: 27 - 32 см*, 40 см**

Расстояние между подножкой и сиденьем: 30 - 40 см, 8 положений

* значения указаны с прокладками или **) без прокладок

Общий вес: 26 кг

Длина коляски: 100 - 145 см

Высота коляски: 107 - 128 см

Ширина коляски: 66 см

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Выбор медицинского изделия, подходящего для конкретного заболевания и состояния пользователя, должен осуществляться с помощью врача-специалиста или физиотерапевта. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по применению и этикеткой или проконсультируйтесь с врачом, так как данное медицинское изделие может вам не подойти.