

Swifty

Комплект подушек-минимайзер

Инструкция по сборке - аксессуар



1a



1b



2



3



4

CE

Thomashilfen

Минимайзер сиденья состоит из 4 частей: подушки для головы, подушка на спинку, подушки сиденья и подушки на подставку для ног.

Подушка на спинку: Установите подушку на спинку сиденья. Нижняя часть подушки должна опираться на поверхность сиденья. Теперь пристегните оба ремня слева и справа к кулачковым пряжкам на нижней задней части спинки. (Рис. 1a/1b)

Подушка для головы: Проденьте ленту двутаврового ремня через петли подушки для головы сверху вниз. Расположите подушку для головы и прикрепите ее крючком и петлей к верхней подушке. (Рис. 2)

Подушка сиденья: Снимите защитный ремень с крючка и петли (крючков) на нижней стороне подушки. Положите подушку сиденья на сиденье и прикрепите ее крючком и петлей к нижней части. (Рис. 3) Убедитесь, что ремешок с крючком и петлей (крючки) не опирается на переплетенные нити подушки Swifty, чтобы избежать повреждения подушки.

Подушечка для ног: Поместите подушечку для ног на подставку для ног. Крючок и петля - закрепите оба лямки под пластиной подставки для ног. (Рис. 4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Комбинированное использование аксессуаров Swifty, таких как боковые опоры для туловища, мягкие тазовые ремни безопасности, жилет для сиденья, тазовый пояс или ремни для ног, невозможно или только в ограниченной степени.

ВНИМАНИЕ: Перед складыванием коляски снимите минимайзер сиденья.